


# Lisähoitoa

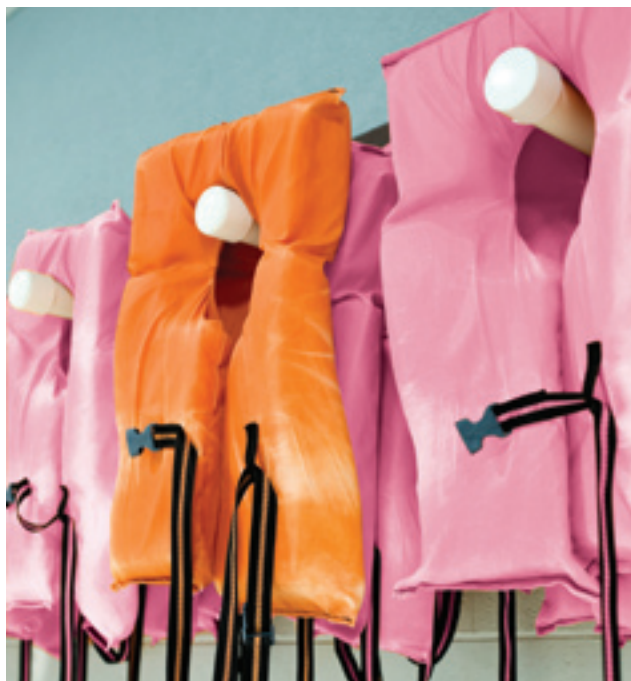

Dansac-tarvikkeet

# Johdanto

Me Dansacilla olemme omistautuneet kehittämään ainutlaatuisia avannepusseja ja ihonsuojalevyjä, joiden avulla autamme parantamaan avannepotilaiden elämänlaatua.

Yksilöllisten eroavaisuuksien takia potilaat saattavat kuitenkin tarvita muitakin hoitotuotteita.

Dansac tarjoaa avannepussien lisäksi myös helppokäyttöisiä lisähoitotuotteita täyttämään näitä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteemme on, että tuotteidemme avulla avannepotilaat voivat tuntea olonsa vielä mukavammaksi ja varmemmaksi jokapäiväisessä elämässään.

Tässä esitteessä kerrotaan Dansacin nykyisestä tuotevalikoimasta. Tuotteet voivat auttaa avanneleikattuja, joilla on ongelmia muun muassa vuotojen, ihon kuivuuden tai ärsytyksen tai epämiellyttävien hajujen kanssa.

Toivomme, että saat esitteestä hyödyllistä tietoa.

Dansac A/S

# Sisältö



Dansac GX-tra -ihonsuojarenkaat .....	4
Dansac Soft Paste -tiiviste .....	6
Dansac Skin Lotion -puhdistusneste ja kosteuspyyhkeet.....	8
Dansac Skin Creme -ihovoide .....	10
Dansac Nodor S -hajunpoistaja.....	12
Muistiinpanoja .....	14

# Dansac GX-tra -ihonsuojarenkaat

## Varmempi tunne

### Lisävarmuutta vuotoja vastaan

Tarvitsetko lisävarmuutta tai oletko huolissasi vuotoista? Dansac GX-tra -ihonsuojarenkaat saattavat olla ihanteellinen ratkaisu näihin ongelmiin. Sen lisäksi, että GX-tra -ihonsuojarenkaat ehkäisevät vuotoja varmemmin, ne myös pidentävät pussin käyttöikää.

GX-tra -ihonsuojarenkaat ovat ihanteellinen ratkaisu punoittaville tai vetäytyneille avanteille, koska ne auttavat vahvistamaan ihonsuojalevyn alaista aluetta ja suojaavat ihoa syövyttäviltä vuotonesteiltä.

GX-tra -ihonsuojarenkaan voi venyttää avanteen ympärille sopivaksi tai leikata pienemmiksi palasiksi täyttämään ihopoimuja ja ihon muotoja. Kun alue on saatu tasoitettua, voidaan avanne kiinnittää normaalisti. Tiivisteiden voi myös kiinnittää suoraan ihonsuojalevyyn.

GX-tra -ihonsuojarenkaat on valmistettu allergiatestatusta GX-hydrokolloidimateriaalista, joka sisältää puuvillakuituja. Puuvillakuidut lisäävät tiivisteiden käyttöikää imemällä kosteutta ja hidastamalla hydrokolloidimateriaalin liukenemistä. Tiivisteet eivät sisällä alkoholia, joten ne sopivat erinomaisesti herkän ihon suojaamiseen, ja ne auttavat luomaan avanteelle hyvän paranemisympäristön.



### Dansac GX-tra -ihonsuojarenkaat

#### Tarvikkeet



Pakkauksessa	30 kpl
Renkaan koko	REF
20 mm	725 - 20 / 30
30 mm	725 - 30 / 30
40 mm	725 - 40 / 30
50 mm	725 - 50 / 30



- Lisävarmuutta vuotoja vastaan
- Pidempi pussien käyttöikä

# Dansac Soft Paste -tiiviste

## Ihopoimujen ja arprien tasoittamiseen

### Tasoittaa ihopoimuja ja arpria

Avannetta ympäröivä ihoalue on usein epätasainen tai poimuinen. Ihon epätasaisuuden takia avannepussin tiivis kiinnittäminen voi olla hankalaa.

Dansac Soft Paste -tiiviste soveltuu erinomaisesti ihopoimujen, ryppyjen ja arprien tasoittamiseen, jolloin sidos saadaan asetettua pitävästi avanteen tai fistelin ympärille. Pasta suojaa ihoa ehkäisemällä vuotojen pääsyä ihonsuojalevyn alle. Se myös pidentää pussin käyttöikää.

Pastaa on helppo levittää kuivalle iholle tai suoraan ihonsuojalevylle kostutetulla sormella tai lastalla. Pastaa levitetään ja muotoillaan, kunnes ihon pinta on sileä, ja sen annetaan kuivua puolen minuutin ajan.

Tämän jälkeen pussi voidaan kiinnittää normaalisti. Tarvittaessa Dansac Soft Paste -pastaa voidaan käyttää yhdessä esimerkiksi Dansac GX-tra -ihonsuojarenkaiden kanssa.



### Dansac Soft Paste -tiiviste

#### Tarvikkeet

Määrä	REF
50,0 g	77514 - 2



- Auttaa tasoittamaan avannetta ympäröivää ihoa
- Suojaa ihoa

# Dansac Skin Lotion -puhdistusneste ja kosteuspyyhkeet

Tehokasta puhdistusta jopa ilman vettä

## Avannetta ympäröivän ihon perusteelliseen puhdistukseen

Haluatko puhdistaa ihosi tehokkaasti vaihtaessasi avannepussisi? Dansac Skin Lotion -puhdistusneste voi olla ratkaisu puhdistusongelmiin.

Avannetta ympäröivän ihon puhdistamiseen suositellaan yleensä puhdasta vettä. Joskus puhdasta vettä ei kuitenkaan ole saatavilla, ja toisinaan iho saattaa tarvita lisäpuhdistusta. Dansac Skin Lotion -puhdistusneste on mieto saippua, joka soveltuu erinomaisesti avannetta ympäröivän ihon puhdistamiseen. Sitä voi käyttää missä tahansa - jopa silloin, kun puhdasta vettä ei ole saatavilla. Avannepotilaat ovatkin käyttäneet tätä kätevää ihonpuhdistusnestettä jo 20 vuoden ajan.

Dansac Skin Lotion -puhdistusnestettä puristetaan pehmeälle paperille, ja paperilla pyyhitään avannetta ympäröivä iho. Puhdistusaineen käytön jälkeen iho taputellaan kevyesti kuivaksi ennen uuden pussin kiinnittämistä.

Dansac Skin Lotion -puhdistusnestettä on saatavana 200 ml pullossa ja kosteuspyyhkeinä.



## Dansac Skin Lotion -puhdistusneste Tarvikkeet

Pakkauksessa	50 kpl	
Volume	REF	REF
200 ml	70000 - 0000	
Kosteuspyyhe	71000-0000	



- Puhdistaa avannetta ympäröivän ihon
- Vettä ei tarvita



## Dansac Skin Creme -ihovoide Tehokosteuttaja

### Vältä kuivuutta ja ihoärsytystä

Avanpussin käyttäminen muuttaa joskus avannetta ympäröivää ihoa. Vaikka käytössä olisivat uusimmat ja ihoystävällisimmät ihonsuojalevyt, avannetta ympäröivä iho voi joskus tuntua kuivalta. Mahdollista ihoärsytystä ja kuivuutta voi ehkäistä levittämällä Dansac Skin Creme -ihovoidetta iholle ennen pussin kiinnittämistä.

Voide sisältää Aloe Veraa sekä A-, D- ja E-vitamiineja, ja se rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa. Dansac Skin Creme -ihovoide ei ole rasvaista, joten se ei haittaa ihonsuojalevyn kiinnittymistä.

Voide on tuoksuton ja väritön, ja se imeytyy nopeasti. Ihosta tulee pehmeä ja sileä ja valmis uuden pussin kiinnitykseen.



### Dansac Skin Creme -ihovoide Lisätarvikkeet

Määrä	REF
100 ml	085 - 00



- Rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa
- Auttaa välttämään ihoärsytystä

# Dansac Nodor S -hajunpoistaja

## Lisää hienovaraisuutta

### Ehkäisee epämiellyttäviä hajuja

Paraskaan pussi tai suodatin ei voi estää hajuja, kun pussia tyhjennetään tai vaihdetaan. Nodor S -hajunpoistaja neutraloi ulosteen hajun, joten pussia vaihdettaessa syntyvien hajujen riskiä voi vähentää lisäämällä pussiin muutaman pisaran hajunpoistajaa.

Dansac Nodor S -hajunpoistaja on turvallinen tuote, joka koostuu vedestä sekä alumiini- ja sinkkisuoloja sisältävästä liuksesta. Se toimii lukitsemalla hajut suolamolekyyleihin ja on itse hajuton.

Dansac Nodor S -hajunpoistajaa käytetään lisäämällä muutama pisara nestettä avannepussiin. Yksilöllisestä ruoansulatuksesta ja ruokavaliosta riippuen hajunpoistajaa saattaa joskus joutua lisäämään muutaman lisätipan, jotta se toimii tehokkaasti.



Dansac Nodor S -hajunpoistaja  
Tarvikkeet

Määrä	REF
50 ml	080 - 00



- Ehkäisee epämiellyttäviä hajuja



## Dansac-tarvikkeet

Joskus iho tarvitsee lisäapua tai -suojaa

Dansac tarjoaa valikoiman tarvikkeita, joiden avulla voit huolehtia ihosta:

## Dansac GX-tra -ihonsuojarenkaat

Varmempi tunne

## Dansac Soft Paste -tiiviste

Tasoittaa ihopoimuja ja arpia

## Dansac Skin Lotion –puhdistusneste ja kosteuspyyhkeet

Avannetta ympäröivän ihon perusteelliseen puhdistukseen

## Dansac Skin Creme -ihovoide

Tehokosteuttaja

## Dansac Nodor S –hajunpoistaja

Lisää hienovaraisuutta